

Oseba je nezavestna in ne diha.

**1**

Sprosti dihalne poti

pokliči



112

**2**

Vključi defibrilator



Sledi glasovnim navodilom

**3**

Namesti elektrodi



Elektrodi namesti na gola prsa, eno pod desno ključnico, drugo pa na leva rebra pod prsno bradavico.

**4**

Umakni se



Med aliziranjem srčnega ritma se umakni.

**5**

Izvedi šok



Pritisni na gumb «ŠOK». Nihče naj se ne dotika bolnika!

**6**

Takoj prični z oživljanjem  
Temeljni postopki oživljanja



Položi roke na sredino prsnega koša. Izvedi 30 potiskov.

Potem izvedi 2 vdiha. Nadaljuj z oživljanjem.

30:2



Sledi glasovnim navodilom

Defibrilator ne bo izvedel šoka, če to ni potrebno!

Vsaka minut, pridobljena z namestitvijo AED aparata poveča možnosti preživetja za 10%.

Svetovanje  
Mitja Dobovičnik  
e: mitja.dobovicnik@defibtech.si  
g: 0 40 22 38 72

Za več o defibrilaciji obiščite  
[www.defibtech.si](http://www.defibtech.si)



Polavtomatski defibrilator Lifeline

Rešujemo življenja

defibtech